



SIRIUS

Návod k použití
včetně programové
knihovny




Galaxy®



Kontraindikace

Bez konzultace s lékařem by neměly používat Sirius tyto osoby:

- osoby trpící jakýmkoliv diagnostikovaným záchvatovým onemocněním (např. epilepsií),
- osoby s diagnostikovanou vážnou duševní poruchou,
- osoby po vážném úraze hlavy nebo páteře,
- těhotné ženy od počátku 6. měsíce těhotenství (do porodu),
- osoby s voperovaným kardiostimulátorem.

Pro tyto skupiny osob se doporučuje prvních několik sezení provádět pod odborným dohledem. Používání farmak souběžně s AVS stimulací je snášeno dobře a kontraindikace nebyly zaznamenány. Sirius není primárně určen k léčbě chorob, a není prostředkem zdravotnické techniky.

Snášenlivost a bezpečnost

Vývoj technologie trval přes 40 let a během této doby nebyly při klinickém ani samouživatelském používání zjištěny žádné vedlejší účinky a nebyl zjištěn vznik závislosti na AVS stimulaci. Pokud se vyskytnou nežádoucí účinky, jsou mírné, přechodné a předvídatelné. Nežádoucí účinky mohou být tyto:

- Výjimečně může Sirius způsobit bolest hlavy nebo nevolnost, která sama odezní.
V takovém případě stimulaci přerušte a přístroj použijte znovu druhý den (nebo později).
- U osob trpících nápadnou světloplachostí mohou světelné signály vyvolat nepříjemné pocity. V takovém případě ztlumte světelné signály na minimum.

Doporučení pro plnohodnotný zážitek a účinek

- Při používání přístroje Sirius mějte zavřené oči (pokud není výslovně v návodu uvedeno jinak). Vnímání světelné stimulace otevřenými očima není zraku škodlivé.
- V případě akutní zdravotní indispozice (probíhající respirační onemocnění, rekonvalescence po vážném úraze, bolest hlavy apod.) přestaňte Sirius používat, pokud na Vás nepůsobí dobře. K používání se vraťte znovu po uzdravení.
- Použití přístroje Sirius souběžně s podáváním alkoholu nebo drogových látek může vyvolat nevolnost.
- Bezprostředně po skončení stimulace (do cca 15 minut) se nedoporučuje, bez předchozí zkušenosti s používáním přístroje Sirius, řídit motorové vozidlo a stavební stroje.
- Věková hranice není omezena.
- Pro zdravé děti do zhruba 6–10 let věku nemá obvykle použití přístroje Sirius žádný zdravotní význam.



Výhradním dodavatelem výrobku Sirius pro Českou a Slovenskou republiku je společnost Galaxy. Výhradním zástupcem výrobce pro Českou a Slovenskou republiku je společnost Galaxy.

Vývoj: Mindplace, Inc., USA
Výroba: Mindplace, Inc., USA

Dodavatel Galaxy

Společnost Galaxy vznikla v roce 1995 a je specializovaným renomovaným dodavatelem AVS technologie (AVS = audiovizuální stimulační technologie) pro evropský trh. Od roku 1998 patří do dvacítky největších distributorů ve světě a od roku 2003 je největším distributorem AVS technologie v Evropě. Společnost Galaxy je přímým partnerem většiny významných a historicky nejstarších světových výrobců, které zastupuje v několika evropských státech. Galaxy spolupracuje s českou odbornou veřejností a světovými odbornými institucemi, například se Světovou asociací pro AVS technologii (WAAT). Galaxy se podílí na celosvětovém výzkumu a vývoji a je odborným garantem AVS technologie pro ČR a SR.

Výrobce

Výrobce přístroje Sirius je společnost Mindplace, Inc. z USA. Vznikla v roce 1986 a patří ke třem největším a historicky nejstarším výrobcům AVS přístrojů na světě. Dnes dodává své výrobky přibližně do 60 zemí světa. Pro Českou republiku ji společnost Galaxy zastupuje od roku 1996.

Práva

- © Kapitoly „Důležitá upozornění“ a „Co je to AVS technologie“ a části návodu odlišujícího se od návodu výrobce jsou chráněny autorskými právy. Jan Valuch. Všechna práva vyhrazena.
Texty a vyobrazení nesmí být použity bez souhlasu autora. Zneužití autorských práv je trestné.
- © Stimulační programy jsou autorským dílem a jsou chráněny autorskými právy, jejichž majitelem je společnost Galaxy Czech s.r.o.
- ® Galaxy, Relaxman, Psychowalkman, Sirius jsou registrované ochranné známky, jejichž majitelem je společnost Galaxy Czech s.r.o. Jejich zneužití je trestné. Názvy technologií jsou mezinárodně chráněná označení.



Rychlý start

- 1) Vložte baterie a připojte kabely od sluchátek a od brýlí do přístroje.
- 2) Zapněte přístroj přepínačem na boku přístroje.
- 3) Navolte si program (podle programové knihovny) stiskem nebo delším podržením tlačítka ▲▼ (NAHORU/DOLU).
- 4) Nasadte si brýle a sluchátka a zavřete oči.
- 5) Stiskněte tlačítko ►■ (START/STOP) a program začne.
- 6) Vyladte si hlasitost a intenzitu světla na příjemnou úroveň.
- 7) Po automatickém skončení programu, nebo kdykoli v jeho průběhu, pokud nutně potřebujete sezení ukončit (nedoporučujeme!), vypněte přístroj přepínačem na boku nebo stiskem tlačítka ►■ (START/STOP).



Sirius je značkový AVS přístroj s ověřenou účinností.
Testováno Světovou asociací pro AVS technologii.



Založena 1995. Specializovaný dodavatel AVS technologie.
Od roku 2003 největší distributor AVS přístrojů v Evropě.
Výhradní dodavatel přístroje Sirius pro Českou a Slovenskou republiku.